

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
МЕДИЧНИЙ ВИРІБ

ВагіТіаб

ПІНА ВАГІНАЛЬНА

з гіалуроновою кислотою, екстрактом мальви звичайної та комплексом ТІАВ

ВагіТіаб піна вагінальна – медичний виріб призначений для допоміжного лікування вульвовагінального подразнення та симптомів (свербіж, печіння, почервоніння), пов'язаних з вульвовагінальним дерматозом або вульвовагінітом, спричиненими бактеріальними, мікотичними та вірусними інфекціями.

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: медичний виріб ВагіТіаб піна вагінальна, призначений для допоміжного лікування вульвовагінального подразнення та симптомів (свербіж, печіння, почервоніння), пов'язаних з вульвовагінальним дерматозом або вульвовагінітом, спричиненими бактеріальними, мікотичними та вірусними інфекціями.

При нанесенні на уражену зону вульви (зовнішню інтимну зону) піна створює захисний і заспокійливий шар, що ізолює і захищає цю ділянку від зовнішніх подразників або патогенних мікроорганізмів.

ВагіТіаб піна вагінальна:

- знімає свербіж, печіння та почервоніння;
- допомагає зменшити симптоми запалення;
- підтримує природний процес загоєння шкірних тканин, ушкоджень і тріщин.

ВагіТіаб піна вагінальна містить такі компоненти:

- **Гіалуронова кислота** – має фундаментальне значення для підтримання рівня зволоженості шкіри, та сприяє утворенню бар'єру і природному процесу загоєння шкіри.
- **Екстракт мальви звичайної** – чинить зволожуючу, заспокійливу та пом'якшувальну дію. Покращує тонус і еластичність тканин.
- Завершує дію медичного виробу **комплекс ТІАВ:** запатентована формула на основі іонів срібла (Ag+), яка зміцнює захисну плівку, створену активними компонентами, ізолює зовнішню область статевих органів і створює найкращі умови для нормального процесу загоєння, запобігаючи виникненню бактеріальних, грибкових і вірусних інфекцій або будь-яких рецидивів.

СКЛАД: гіалуронат натрію, гліколевий екстракт мальви звичайної, ТІАВ (мікрочастинки діоксиду титану з ковалентно зв'язаними одновалентними іонами срібла), молочна кислота, аллаїноїн, ментил лактат, рослинний гліцерин, каприловий/каприновий тригліцерид, стеарет-2, стеарет-21, ПВП К30, хлорид бензалконію, вода. Пропелент: суміш бутан-ізобутан-пропан.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

- Перед застосуванням вимити руки, очистити оброблювану ділянку і ретельно висушити її.
- Перед застосуванням добре струсити флакон.
- Нанести тонкий шар піни на уражену ділянку.
- Мажувати до повного вбирання.
- Застосовувати один або кілька разів на день.
- Піну слід наносити на уражену ділянку з появою перших симптомів (свербіж, печіння, почервоніння тощо) або використовувати для запобігання специфічного дискомфорту, такого як вульвовагінальне подразнення.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ:

- Не використовувати продукт для цілей, відмінних від зазначених в інструкції щодо застосування.
- У разі потрапляння в очі негайно і ретельно промити їх водою.
- Не використовувати засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
- Тільки для зовнішнього застосування, не ковтати.
- Не використовувати, якщо упаковка відкрита або пошкоджена.
- Не застосовувати у разі наявності відомої підвищеної чутливості до будь-якого з компонентів.
- Припинити лікування у разі появи аномальних шкірних реакцій.
- У разі тривалого використання проконсультуватися з лікарем.
- Засіб не є ні сперміцидом, ні контрацептивом.
- У зв'язку з відсутністю конкретних підтверджуючих даних щодо застосування продукту під час вагітності або годування груддю, а також для використання у дітей, обов'язково звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж застосовувати засіб.

ПРОТИПОКАЗАННЯ: випадків передозування не спостерігалось. Відома підвищена чутливість до компонентів. Взаємодії з лікарськими засобами та лікарськими речовинами не відомі.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати при температурі від +9 °С до +25 °С в сухому, недоступному для дітей місці. Захищати від сонячних променів. Не піддавати впливу температур, що перевищують 50 °С.

УПАКОВКА: по 50 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці.

ДАТА ОСТАННЬОГО ПЕРЕГЛЯДУ В ІТАЛІЇ: Листопад 2020.

ДАТА ОСТАННЬОГО ПЕРЕГЛЯДУ В УКРАЇНІ: Січень 2025.



ВИРОБНИК: ENTI S.p.A.,
Via Luigigi Razza, 3, 20124 Milan, Italy.
(NTC S.r.l., Via Luigigi Razza, 3, 20124 Milan, Italy).



МАРКЕТИНГ ЗДІЙСНЮЄ: Євро Лайфкер.

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ: ТОВ Конарк Інтелмед, вул. Шевченка, 315, м. Харків, 61033, Україна, тел. +38 (044) 502-63-91.

Уповноважений представник в Україні здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів.



Європейський знак відповідності.



Серія №



Зберігати у сухому місці.




Придатний до



Захищати від сонячних променів.



Упаковку слід викинути у смітник.

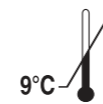

Зберігати при температурі від +9 °С до +25 °С.



Засторога! Ознайомитись із супровідними документами.



Не використовувати виріб, якщо упаковка пошкоджена.



UA.TR.126

Знак відповідності вимогам Технічного регламенту, затвердженого Постановою КМУ № 753 від 02.10.2013. Ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності -UA.TR.126.



Перед застосуванням ознайомитись з інструкцією щодо застосування.



Увага!
H223 Легкозаймистий аерозоль.
H229 Контейнер під тиском: може розірватися при нагріванні.
Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не палити. Не проколювати і не спалювати, навіть після використання. Захищати від сонячних променів. Не піддавати впливу температур, що перевищують 50 °С. Не розпилювати на відкрите полум'я або інші джерела займання. Зберігати в недоступному для дітей місці.

LFTIA04800